

Desinfektions-Reiniger Super F6000

Anwendungsgebiete:

Lösung zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren, nicht porösen Oberflächen.

Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Wirkt gegen Bakterien (u.a. Salmonellen, Listerien, und MRSA), Hefen, Pilze und Viren (u.a. Noro-, Adeno-, Polio- und Vacciniaviren, H1N1, H7H9, HBV und Coronaviren).

Aldehyd- und parfümfrei.



pH-Wert: sauer neutral alkalisch

Produkteigenschaften:

- bakterizid, levurozid, fungizid, voll viruzid
- für Böden und abwaschbare Oberflächen

Anwendung:

Zunächst grobe Verschmutzungen entfernen.

Anwendungslösung in gewünschter Konzentration

ansetzen. Für eine bakterizide, levurozide, fungizide sowie begrenzt viruzide Wirksamkeit PLUS 60ml/l dosieren und 15 Minuten einwirken lassen.

Wischhilfe (Tuch, Schwamm o.ä.) in Lösung tränken.

Oberflächen feucht wischen. Für eine desinfizierende Wirkung auf vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Mit Wasser in Trinkwasserqualität nachwischen und an der Luft trocknen lassen.

Weitere Anwendungskonzentrationen, Wirkungsspektren und Einwirkzeiten entnehmen Sie bitte dem Originaletikett.

Hinweis:

siehe SDB

BAuA: Reg. Nr. N-103840

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Inhaltsstoffe:

siehe SDB

Desinfektions-Reiniger Super F6000

Artikel/Verpackung:

1l Flasche	EAN Flasche 4000602007465
8 Flaschen je VSE	EAN VSE 4000602097459
Art. Nr.: 1l Flasche	1745000
Palette	44 Kartons (352Flaschen)
Gewicht Flasche	1,78kg
Gewicht VSE	14,24kg