

## Schnelldesinfektion

### Anwendungsgebiete:

Desinfiziert Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen, Kontaktflächen wie Handläufe, Türklinken und WC-Brillen. Ideal für die Anwendung zwischen den Arbeitsgängen.

Gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar, trocknet schnell von der behandelten Oberfläche ab.

Wirksam gegen: Bakterien (inkl. Salmonellen und Tbc), Pilze (inkl. Hefen und Schimmelpilze).

Wirksam gegen: Viren (HBV, HIV, HCV, Vaccinia Viren, BVDV).

Ist phenol- und QAV-frei. Geprüft und zertifiziert nach den Richtlinien von DGHM/VAH. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet. Auch für Allergiker geeignet, da aldehyd- und parfümfrei.



pH-Wert: sauer  neutral  alkalisch

### Produkteigenschaften:

- Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Noro-Virus ab 2 Min.
- zertifiziert nach DGHM/VAH, IHO gelistet
- wirkt gegen Bakterien inkl. MRSA, Salmonellen und Listerien, Tbc, Pilze inkl. Hefen und Schimmelpilze, Viren (BVDV und Vaccinia Virus)
- trocknet schnell und rückstandsfrei ab, ohne Abspülen und Nachwischen
- gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar
- phenol- und QAV-frei

### Anwendung:

Flächen und Gegenstände aus mind. 30cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen und vollkommen trocknen lassen. Kein weiteres Nachspülen und Nachwischen notwendig. Anwendungsgebiete gem. Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen.

Detaillierte Anwendungstabelle siehe Seite 2

### Hinweis:

GHS02, GHS07 Achtung

Alkoholempfindliche Materialien z.B. Acrylglas dürfen nicht besprüht werden. Aufrecht transportieren und lagern. Desinfektionsmittel sicher verwenden.

### Inhaltsstoffe:

in 100g sind enthalten: 35g Ethanol; 25g 2-Propanol

## Schnelldesinfektion

### Artikel/Verpackung:

1l Flasche	EAN Flasche 4000602004518
10 Flaschen je VSE	EAN VSE 4000602094519
Art. Nr.: 1l Flasche	1451000
Palette	32 Kartons (320 Flaschen)
Gewicht Flasche	1,03kg
Gewicht VSE	10,3kg
5l Kanister	EAN Kanister VSE 4000602004563
Art. Nr.: 5l Kanister	1456000
Palette	93 Kanister
Gewicht Kanister	4,80kg

<b>Wirkungsspektrum:</b>	<b>Dosierung:</b>	<b>Einwirkzeit ab:</b>
<b>Bakterien gem. VAH</b>	konz.	5 Min.
<b>Bakterien</b> Tuberkulose, Salmonellen	konz.	30 Sek.
<b>behüllte Viren</b> BVDV, HBV, HCV, HIV, H5N1, H1N1, Vaccinia	konz.	15 Sek.
<b>unbehüllte Viren</b> Rota Noro	konz. konz.	15 Sek. 2 Min.
begrenzt viruzid	konz.	15 Sek.