

MoliCare® Premium MEN PANTS


Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Bei MoliCare® Premium MEN PANTS handelt es sich um Einmalhosen zur Inkontinenzversorgung für Männer. Die Produkte eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung. Die Produkte sind für die Verwendung bei mobilen und eingeschränkt mobilen Herren sowie bei unruhigen oder dementen Anwendern ausgelegt. Die Produkte sind ausschließlich für den Einmalgebrauch geeignet und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden. Die Produkte können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden.

Anwendung/Indikation

MoliCare® Premium MEN PANTS eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung.

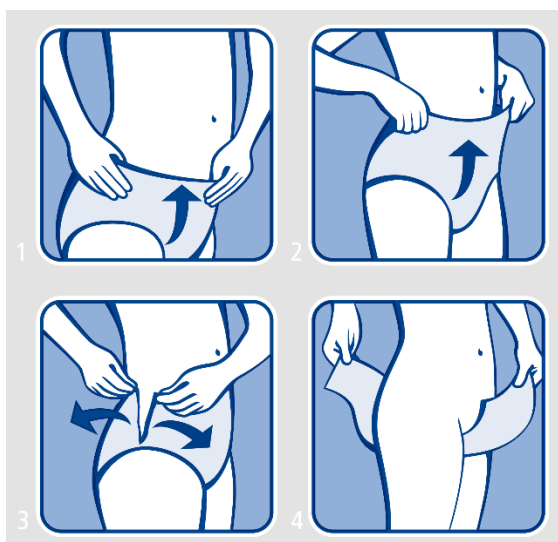

Artikelnummern*

| Verpackung | | M | L |
|------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| | Hüft-/Taillenumfang (cm) | 80–120 | 100–150 |
| P8 | 5 Tropfen / grün | 915817 | - |
| | 7 Tropfen / blau | 915827 | - |
| P7 | 5 Tropfen / grün | - | 915818 |
| | 7 Tropfen / blau | - | 915828 |
| P1 | 5 Tropfen / grün | 915802 | 915803 |
| | 7 Tropfen / blau | 915807 | 915808 |

*Möglicherweise ist das volle Sortiment nicht in allen Ländern erhältlich.

Produkt zum Einmalgebrauch

MoliCare® Premium MEN PANTS

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® Premium MEN PANTS entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts

MoliCare® Premium MEN PANTS 5 Tropfen / grün:

| Merkmale | Einheit | M | L |
|-----------------|---------|----|----|
| Gesamtgewicht:* | [g] | 55 | 62 |

* $\leq \pm 10\%$ Gewichtsabweichung

MoliCare® Premium MEN PANTS 7 Tropfen / blau:

| Merkmale | Einheit | M | L |
|-----------------|---------|----|----|
| Gesamtgewicht:* | [g] | 65 | 71 |

* $\leq \pm 10\%$ Gewichtsabweichung

Materialeigenschaften

| Bestandteil | Material |
|------------------------|--|
| Hauptteil | Polypropylen-Vlies, hydrophob, atmungsaktiv, grau |
| Rückseite: | Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, atmungsaktiv, grau |
| Saugkern (3-lagig): | 1. Lage: Zellstoff* 2. Lage: Zellstoff-* / SAP-Gemisch 3. Lage: Zellstoff*, Curly Fiber *elementarchlorfrei gebleicht |
| Kleber: | Schmelzkraftkleber |
| Oberseite: | Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß |
| Bündchen: | Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß |
| Elastikfäden: | Elastikfäden auf Polyurethan-Basis für Beinabschluss, Hüftbereich, Taille und Innenbündchen |
| Produktinformationen: | Aufdruck auf Innenseite des Taillenbunds (Rückseite) |

MoliCare® Premium MEN PANTS


Produktmerkmale

| Abmessungen | M | L |
|------------------------------|-----|-----|
| Gesamtlänge*: | 750 | 850 |
| Gesamtbreite*: | 660 | 810 |
| Schrittbreite*: | 245 | 245 |
| Länge Saugkern*: | 470 | 520 |
| Breite Saugkern*: | 180 | 180 |
| Breite Saugkern im Schritt*: | 110 | 110 |

* $\leq \pm 10\%$ Maßabweichung

Kennzeichnung

9-stelliger Chargen-Code

z. B.:  9 001 02 82 2
 Jahr 201X Interner Schlüssel Interner Schlüssel Interner Schlüssel Kumulierte Prüzfiffer

Herstellungsdatum

z. B.:  2019 08 07
 Jahr Monat Tag

Verfalldatum

z. B.:  2024 08 01
 Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



MoliCare® Premium MEN PANTS

CE-Kennzeichnung

CE

Letzter Überarbeitungsstand: 2019-10-04