

MoliCare® Slip, Inkontinenzslip

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Bei MoliCare® Slips handelt es sich um nicht sterile, saugfähige Slips für die Inkontinenzversorgung von Erwachsenen. Im Rahmen der häuslichen Pflege und der professionellen Gesundheitsversorgung werden sie bei Blasenschwäche sowie bei Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden eingesetzt. Sie können sowohl von medizinischen Fachkräften als auch von Laien verwendet werden. Das Produkt ist nur einmalig zu verwenden. Ein neues Produkt kann beliebig häufig angewendet werden.

Anwendung/Indikation

Bei Harn- und Stuhlinkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden.



Artikelnummern*

Verpackung		XS	S	MM	L	XL
	Hüft-/Taillenumfang (cm)	40-60	60-90	90-120	120-150	150-175
P30	normal plus				165 033	
	extra	165 130	165 131	165 132	165 133	
	extra plus	165 230	165 231	165 232	165 233	
	super		165 331	165 332	165 333	
	super plus		165 431	165 432	165 433	
P14	extra					165 134
	extra plus					165 234
	maxi		165 531	165 532	165 533	
P2	normal plus				165 053	
	extra	165 150	165 151	165 152	165 153	165 154
	extra plus	165 350	165 351	165 352	165 353	165 354
	super		165 551	165 552	165 553	
	super plus		165 651	165 652	165 653	
	maxi		165 751	165 752	165 753	

MoliCare® Slip, Inkontinenzslip

*Möglicherweise ist das volle Sortiment nicht in allen Ländern erhältlich.

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® Slip entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts

Merkmale	Einheit	Größe	normal plus	extra	extra plus	super	super plus	maxi
Gesamtgewicht:*	[g]	XS		56	61			
		S		60	65	67	72	96
		MM		83	89	88	97	161
		L	99	103	109	105	114	189
		XL		118	126			

* \pm 10% Gewichtsabweichung

Materialeigenschaften

Bestandteil	Material
Rückseite:	Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat (ausgenommen bei MoliCare Slip maxi), blau
Saugkern (3-lagig):	<ol style="list-style-type: none"> Lage: Zellstoff* Lage: Zellstoff-* / SAP-Gemisch Lage: Zellstoff, Curly Fiber *elementarchlorfrei gebleicht

MoliCare® Slip, Inkontinenzslip

Kleber:	Schmelzkraftkleber
Oberseite:	Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß
Bündchen:	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
Elastikfäden:	Elastikfäden für Beinabschluss und Innenbündchen
Nässeindikator:	Wasserlösliche Tinte
Seitenteile	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß bei MoliCare Slip maxi: Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat
Fixierbänder	3-lagig mit Polypropylen-Vlies, Klebstoff, Verschlussstreifen aus Polypropylen (Klettband) bei MoliCare Slip maxi: Polypropylen und Klebstoff

Produktmerkmale

Abmessungen	Einheit	Größe	normal plus	extra	extra plus	super	super plus	maxi
Gesamtlänge:*	[mm]	XS		610	610			
		S		700	700	700	700	700
		MM		815	815	815	815	815
		L	980	980	980	980	980	980
		XL		980	980			
Gesamtbreite Bauchseite:*	[mm]	XS		410	410			
		S		490	490	490	490	500
		MM		650	650	650	650	660
		L	780	780	780	780	770	780
		XL		930	930			
Gesamtbreite Rückenseite:*	[mm]	XS		410	410			
		S		490	490	490	490	500
		MM		650	650	650	650	650
		L	780	780	780	780	770	770
		XL		930	930			
Schrittbreite:*	[mm]	XS		220	220			
		S		240	240	240	215	215
		MM		320	320	320	270	300
		L	320	320	320	320	270	300
		XL		320	320			

MoliCare® Slip, Inkontinenzslip

Länge Saugkern:*	[mm]	XS	520	520				
		S	540	540	540	540	565	
		MM	660	660	660	650	650	
		L	780	780	780	780	780	
		XL	780	780				
Breite Saugkern Bauchseite:*	[mm]	XS	190	190				
		S	190	190	190	190	280	
		MM	200	200	200	300	300	
		L	200	200	200	200	320	360
		XL	240	240				
Breite Saugkern Rückenseite:*	[mm]	XS	190	190				
		S	190	190	190	190	280	
		MM	245	245	245	320	380	
		L	265	265	265	265	320	425
		XL	350	350				
Breite Saugkern im Schritt:*	[mm]	XS	135	135				
		S	135	135	135	135	135	
		MM	170	170	170	175	160	
		L	170	170	170	170	175	160
		XL	180	180				

* \pm 10% Maßabweichung

Kennzeichnung

9-stelliger Chargen-Code
z. B.: 900102822



9	001	02	82	2
Jahr 201X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer

Herstellungsdatum

z. B.: 	2019	08	07
	Jahr	Monat	Tag

Verfalldatum

z. B.: 	2024	08	01
--	------	----	----

MoliCare® Slip, Inkontinenzslip

Jahr

Monat

Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



CE-Kennzeichnung



Letzter Überarbeitungsstand: 2020-02-13