



Leitfaden

Reinigung und Desinfektion

Da sowohl Influenza als auch Epidemien in der aktuellen weltweiten Situation weitaus häufiger auftreten als je zuvor, müssen Präventionsmaßnahmen ergriffen werden um diese weitestgehend eindämmen zu können.

Insbesondere ist der grundlegendste Weg, die Reinigung und Desinfektion der medizinischen Geräte.

Wir stellen diese Leitfäden zur Verfügung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden, Patienten und Ärzte sicher sind und Infektionen verhindert werden können.

Fetal



ECOTwin LED / ECOTwin LCD / ECOsound / Smart 1 / Smart 3

EKG



Cardio M / Cardio M Plus / PHYSIO PORT
Cardio M-Holter LZ EKG / Cardio E3 / Cardio M-PC

Patientenmonitore



COMPACT 5 / 7 / 9



PROview 10/12
M10

BDM



Excellus / Primus / inus D
inus S

Die Reinigung und Desinfektion sollte mit geeigneten Mitteln erfolgen. Wenn Medizinprodukte mit nicht zugelassenen Wirkstoffen gereinigt oder desinfiziert werden, können Schäden an den Kunststoffverbindungen am Gerät auftreten.

Daher empfehlen wir Ihnen im Nachfolgenden mehrere Mittel, um eine korrekte Reinigung und Desinfektion zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie die aufgeführten Geräte, und die dazu richtigen Desinfektions- und Reinigungsmittel.

Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel für medical ECONET-Geräte

Um Geräteschäden und die Ausbreitung von Krankheitserregern am medizinischen Gerät zu verringern, empfehlen wir die folgenden abwischbaren und flüssigen Produkte. Alle nachstehenden Produkte sind gebrauchsfertige und alkoholfreie Produkte.

So können Sie die Oberflächen alkoholempfindlicher Medizinprodukte einfach und effizient desinfizieren.

Die flüssigen Produkte werden als Konzentrat geliefert. Hierbei sollte auf die entsprechende Konzentration geachtet werden, um die zu bearbeitende Stelle nicht zu beschädigen. Auch diese Produkte können mit Tüchern verwendet werden.

Tücher

MyClean® Wipes DSOA

...

Mikrobac® Tissues

...

CLEANISEPT® WIPES

...

Desinfektions-Trockentücher ClinWipes 60

46.20-5142

Flüssigkeiten



HIMED® SinAlc sensitive

46.20-5141

Optisept®

...

Mikrobac® forte

...

